

Einweisungsnachweis Heavy Bed 400



Partner für Lagerung und Therapie

Gemäß §5 der MPBetreibV darf das Medizinprodukt, welches Gegenstand dieser Einweisung ist, nur dann betrieben und angewendet werden, wenn zuvor der Hersteller oder eine vom Hersteller befugte Person das Medizinprodukt am Betriebsort einer Funktionsprüfung unterzogen hat. Ferner müssen die vom Betreiber beauftragten Personen in die Handhabung, die Anwendung und den Betrieb des Medizinprodukts anhand der Gebrauchsanweisung sowie beigefügter sicherheitsbezogener Informationen und Instandhaltungshinweise durch den Hersteller, oder eine vom Hersteller befugte Person, eingewiesen werden. Die Einweisung ist zu dokumentieren.

Nachdem die vom Betreiber beauftragten Personen mit dem Medizinprodukt und der Betriebsanleitung vertraut gemacht wurden, sind vom Einweisenden nochmals folgende besonders relevante Punkte deutlich hervorzuheben:

- ① Das Heavy Bed 400 darf mit maximal 400kg belastet werden!
- ① Bei der manuellen oder elektrischen Bedienung des Bettes besteht Klemmgefahr zwischen den beweglichen Teilen. Es ist darauf zu achten, dass niemand beim Anheben des Bettes eingeklemmt wird. Beim Einsatz der Handbedienung, ist das Augenmerk immer auf das Bett zu richten. Es ist immer sicherzustellen, dass keiner bei der Bedienung des Bettes eingeklemmt wird. Kriechen Sie niemals unter das Bett.
- ① **Fehlerfunktion bei nicht erfolgter Wartung.**
Die Wartungsintervalle sind einzuhalten. Die Benutzung des defekten Bettes ist nicht zulässig.
- ① **Überlastung.**
Die max. zulässige Belastung des Bettes ist einzuhalten.
- ① **Fehlbedienung.**
Übergeben Sie die Handbedienung nur einer Person, von der Sie wissen, dass sie mit der Bedienung und den Funktionen vertraut gemacht worden ist. Befolgen Sie die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung.
- ① Eventuelle Funktionsprobleme lassen sich durch ein Nullstellen der Schaltbox beheben.
- ① **Personalbedienung. Darf dem Patienten nicht überlassen werden.**
- ① *Beim Ein-/Aussteigen von der Seite, ist zuerst immer die Liegeflächenbreite auf die schmalste Position zu stellen.*
- ① Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit sowohl auf den Patienten als auch auf das Bett. Das Aussteigen lässt sich jederzeit durch ein Loslassen der Taste unterbrechen.
- ① **Nach dem Transport ist zu sichern, dass das Bett fest auf allen Beinen steht und dass alle Räder in die höchste Stellung gefahren worden sind.**

Einweisung durchgeführt von:

Datum:

Name, Anschrift, Firmenstempel:

Eingewiesen wurden:
